


suPARnostic® Quick Test Reader - Guida rapida

Come utilizzare il lettore senza un PC.


Questa guida mostra il flusso di lavoro per l'utilizzo del lettore senza PC. Con questa guida sarà possibile eseguire la misurazione del dispositivo suPARnostic® Quick Triage, recuperare un risultato vecchio e controllare la calibrazione in caso di messaggio di errore.

Schermata Menu N.

0.1

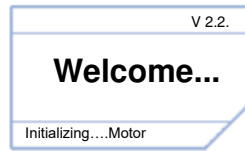

- Premere e tenere premuto Invio (5) per accendere il lettore

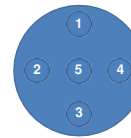


0.2



Come spostarsi all'interno del menu:


- Spostarsi su e giù nel menu con (1) e (3) per selezionare la voce che si desidera modificare, ad es. l'ID del campione.
- Inserire la voce premendo Invio (5).
- Dopo aver scelto la voce da modificare, premere Su (1) e Giù (3) per modificarla.
- Uscire dalla voce selezionata premendo nuovamente Invio (5).
- Se il menu comprende più di una pagina, spostarsi tra le pagine con (2) e (4).

1.0 - Menu scansiono

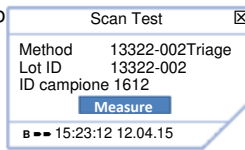


- Selezionare il metodo per il lotto specifico
- Visualizzare l'ID LOTTO per il metodo corrente
- Visualizzare l'ID del campione
- Premere "Measure" (Misurazione) per avviare la misurazione del dispositivo

1.1

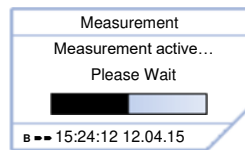

- Attendere mentre la misurazione è attiva


1.2

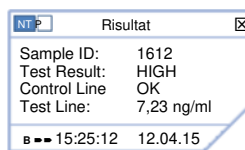

- Se viene eseguito un nuovo test, premere NT
- Premere P per stampare il risultato (SOLO con stampante esterna)
- Selezionare la croce per accedere al MENU PRINCIPALE.
- Utilizzare i tasti (2) e (4) per spostarsi a sinistra e a destra.




0.3 - Menu principale

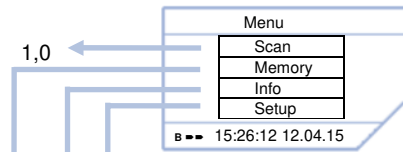


- Premere su qualsiasi pagina per accedere alla schermata del Menu principale
- Selezionare **SCAN** (SCANSIONE) per eseguire le misurazioni (1.0)
- Recuperare i risultati archiviati nel menu **MEMORY** (Memoria) (2.0)
- Il menu **INFO** (Informazioni) visualizza ID, numero di serie e firmware del lettore. *Nota: Saltare la pagina 1. Utilizzare (4) per andare alla pagina 2.*
- Menu **SETUP** (Impostazione): configurazione e formato dell'ora, calibrazione del lettore e altre impostazioni.


2.0 - Menu

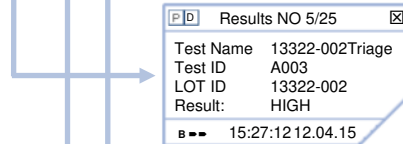

2.1

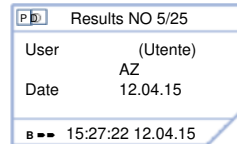



2.2

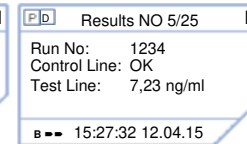

Ogni risultato ha 3 pagine

- P — Stampa (necessaria stampante esterna)
- D — Elimina risultato


3.0 - Menu Info 3.1

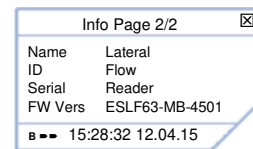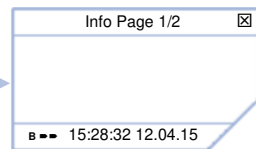


- Impostazione tramite Lateral Flow Manage Software

Le informazioni del Menu 3.1 saranno necessarie quando si contatta ViroGates per la risoluzione dei problemi.


4.0 - Menu Impostazione

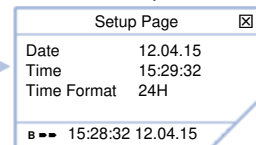

4.1

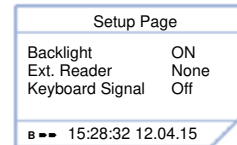

4.2

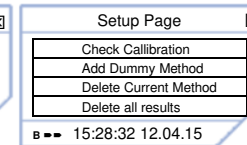

- Il Menu Impostazione è sviluppato per ViroGates. Nel caso in cui il lettore segnali un errore di calibrazione, utilizzare l'opzione "**Check Calibration**" (Controlla calibrazione) mostrata in 4.2

ViroGates A/S
 Banevænget 13
 Birkerød 3460 Danimarca
 Tel: +45 2113 1336
 Skype: Virogates